

ФИО соискателя _____ Дата _____

Алгоритм выполнения пробы на индивидуальную совместимость крови донора

№	Действия	1*	0,5**	0***
1.	Подготовил оснащение: эритроциты донора, сыворотку реципиента, белый планшет, 2 мл шприц, пипетка, стеклянные палочки, карандаш по стеклу, марлю, антисептик, физиологический раствор.	14	7	
2.	- Через иглу нанес несколько капель эритроцитов на край планшета. - Нанес 2-3 капли сыворотки. - Смешал стеклянной палочкой.	4 4 4	2 2 2	0
3.	- Выдержал экспозицию 5 минут покачивая планшет.	14	7	0
4.	- Добавил физиологический раствор.	10	5	
5.	- Оценил результаты: наличие или отсутствие агглютинации.	10	5	0
6.	- Удалил результаты работы марлей, поместив последнюю в специальный контейнер.	10	5	0
7.	- Обработал антисептиком планшет.	10	5	0
8.	- Убрал оборудование.	10	5	0
9.	- Сделал запись о результатах в медицинской документации.	10	5	0
	Итого			